

临床操作指导 机器的使用和保养规则临床执业医师考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/606/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_B4\\_E5\\_BA\\_8A\\_E6\\_93\\_8D\\_E4\\_c22\\_606502.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/606/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_93_8D_E4_c22_606502.htm)

方法及内容

- 1.机器的外部清洁应每日进行。严格按照操作规程使用机器，使用中如发生故障，应立即停止，待检修后方可继续使用。
- 2.机器使用完毕，应切断电源，下班时切断总开关，并盖好机器。
- 3.机器应避免震动，紫外线及高频治疗机尤应注意，以防损坏灯管。
- 4.紫外线灯管应经常（至少每周1~2次）用乙醚或无水乙醇擦拭，禁用手指和粗硬物触摸。
- 5.燃点紫外线灯的持续时间，一般每次不宜超过2h，应集中患者进行治疗，避免机器时开时关，影响灯管寿命。治疗中灯管如突然熄灭，应切断电源，待其冷却后，方可开灯。
- 6.使用高频电疗机治疗时，应把调谐机钮调至最佳谐振点，以免损坏电子管。
- 7.高频电疗机不得连续使用2~3h以上，炎热季节，应用电扇冷却。
- 8.超声声头切忌碰撞，每3~6个月应检查、核实输出功率1次。
- 9.治疗室应保持通风干燥。潮湿地区和多雨季节，最好在机器内部放置防潮剂。
- 10.各种治疗机，每季度应彻底清洁机器内部灰尘、检修内部线路及鉴定机器效能1次。
- 11.非本科医护人员不得搬弄使用机器；外来实习或进修人员，应在本科医护人员指导下使用机器；无检修经验的工作人员不得单独检修机器。

更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)